## Begleitschein für Blutentnahme-Kit

Online-Erstellung: Bitte die Blutkit-Nr. im Online-Doku-System (eCRF) einer Patientin zuordnen und den damit automatisch erstellten Begleitschein ausdrucken!
Andernfalls vorliegendes Formular vollständig ausfüllen!
Blutentnahmebox nur mit ausgefülltem Begleitschein versenden!

Studienzentrum:			
Zentrumsnummer:		DETECT IV	
Kontaktperson /Telef	onnummer:		
Patienten-Nr.:			
Blutkit-Nr.:			
Geburtsjahr:			
Blutentnahmedatun	n:		
Blutentnahme:	<ul> <li>□ 1. Trafo-Visit (4 Wochen na</li> <li>□ 2. Trafo-Visit (12 Wochen na</li> <li>□ 3. Trafo-Visit (24 Wochen na</li> <li>□ 4. Trafo-Visit (36 Wochen na</li> <li>□ 5. Trafo-Visit (48 Wochen na</li> <li>□ Abschluss-Visit:</li> <li>1 Jahr nach Beginn d.</li> <li>im Falle eines Studien</li> </ul>	<ul> <li>□ Baseline-Visit (vor Beginn der Therapie)</li> <li>□ 1. Trafo-Visit (4 Wochen nach Beginn d. Therapie)</li> <li>□ 2. Trafo-Visit (12 Wochen nach Beginn d. Therapie)</li> <li>□ 3. Trafo-Visit (24 Wochen nach Beginn d. Therapie)</li> <li>□ 4. Trafo-Visit (36 Wochen nach Beginn d. Therapie)</li> <li>□ 5. Trafo-Visit (48 Wochen nach Beginn d. Therapie)</li> <li>□ Abschluss-Visit:         <ul> <li>1 Jahr nach Beginn d. Therapie ODER</li> <li>im Falle eines Studienabbruchs ODER</li> <li>im Falle eines Progresses unter Therapie</li> </ul> </li> </ul>	

Sehr geehrte Prüfärztin, sehr geehrter Prüfarzt,

## Bitte beachten Sie bei der Blutentnahme Folgendes:

- Nehmen Sie das Blut nach Möglichkeit am Wochenanfang (Mo-Mi) ab und versenden Sie es anschließend per Post.
- 2. Bitte überprüfen Sie vor der Blutabnahme, ob die Haltbarkeitsdaten der Röhrchen abgelaufen sind.
- 3. Bitte nehmen Sie das Blut für das rote Serum-Röhrchen zuerst ab.
- Bitte füllen Sie alle Blutröhrchen (insbesondere die gelb-violett getigerten für die CTC-Analyse) vollständig, da nur so eine korrekte Auswertung (CTC-Befundung = Studienvoraussetzung) möglich ist.
- 5. Schwenken Sie die Röhrchen nach der Abnahme ca. 5 mal.
- Kontrollieren Sie, ob die Nummer auf dem Blut-Kit identisch ist mit den Nummern auf den Röhrchen und vermerken Sie die Nummer in der Akte der Patientin (zusätzlicher Aufkleber).

Vielen Dank für Ihre Kooperation, Ihr DETECT IV-Team

(März 2014)

## Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Forschungslabore der Frauenklinik am Universitätsklinikum Düsseldorf Life Science Center Düsseldorf z. Hd. Dr. rer. nat. Dieter Niederacher Merowingerplatz 1A – 40225 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 385428 120 – Fax: +49 (0) 211 385428 160

E-Mail: Niederac@med.uni-duesseldorf.de