

Packanleitung Analyse-Kit



Alle Blutabnahmen außer Screening

DETECT IV

1.



Das Analyse-Kit wird Ihnen versandfertig zugeschickt;...

2.



...enthalten sind eine Hämobox (rot) und ein Safetybag.

3.



Nehmen Sie das Blut nach Möglichkeit am Wochenanfang (Mo-Mi) ab, um eine schnelle Verarbeitung im Labor zu gewährleisten.

Bestandteile der Hämobox:

- 1) 2 CellSave-Tubes
- 2) 1 großes EDTA-Tube
- 3) 1 Serum-Tube
- 4) 2 kleine EDTA-Tubes
- 5) Butterfly zur Blutabnahme für Vacutainer sowie Schutzhalter

Bitte den online erstellten Begleitschein (im eCRF) ausdrucken oder beigelegtes Blanko-Formular ausfüllen und unbedingt dem Analyse-Kit beilegen!

4.



Das gefüllte Kit mit den Blutentnahmeröhrchen schließen. Bitte achten Sie darauf, dass ein kleines Absorptionskissen dabei im Kit liegt. Das große Absorptionskissen darumwickeln und gemeinsam in das Safetybag geben.

5.



Safetybag verschließen und in die schwarze Versandtasche geben.

Packanleitung Analyse-Kit



Alle Blutabnahmen außer Screening

DETECT IV

6.



Die Versandtasche mit den dazugehörigen Paketklammern verschließen...

7.



...sie ist bereits frankiert und adressiert. Sie müssen nur Ihren Absender hinzufügen.

8.



Das Paket kann dann direkt zum nächstgelegenen Briefkasten bzw. zur Poststelle gebracht werden.

Der Versand sollte noch am Tag der Blutentnahme erfolgen.